


Minden, amit a maszkok használatáról tudni érdemes



Textil maszk
Mások védelme érdekében



Sebészi maszk
Mások védelme érdekében

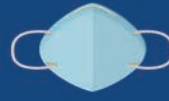

FFP2, FFP3 maszk
(szűrőbetéttel vagy anélkül)
Magunk és mások védelme érdekében

MIÉRT?

- A COVID-19 terjedésének lehetséges csökkentése érdekében a köhögés vagy tüsszentés alkalmával távozó fertőző cseppek felfogása
- Fertőzésátvitel megakadályozása érdekében (külső védelem)

HOGYAN?

Felvétel előtt

A kezét alkoholos szerrel kell fertőtleníteni vagy szappannal kezelt kezet kell mosni.

Min. 30 mp.



Helyesen a **száj, az orr és az arccsont** elé kell felhelyezni a maszkot. A maszknak szorosan illeszkednie kell.

Ha átnedvesedik a maszk, azonnal cseréljük le.



A levétel a gumi/kötő érintésével történjen.

Levételt követően a kezét alkoholos szerrel kell fertőtleníteni vagy szappannal kezelt kezet kell mosni.

Min. 30 mp.



Alapanyag

Kétrétegű pamut (előzetesen ellenőrizze, hogy a maszkon keresztüli légzés biztosított-e)

Tisztítás


Textil, varrott maszk

- minden egyes használat után elkülönítve kell tárolni és mosni
- mossuk mosógépben min. 60 fokon vagy főzzük ki egy edényben 5 percen keresztül (ha szükséges, távolítsuk el a fém alkatrészeket)



Sebészi maszk, FFP2, FFP3 maszk

- az átnedvesedett maszkot azonnal cserélje le
- mindig kövesse az előírásokat*

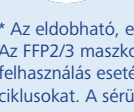

* Az eldobható, egyszer használatos termékek általában nem alkalmasak többszöri felhasználásra. Az FFP2/3 maszkokat elsősorban az egészségügyi ellátó rendszer rendelkezésére kell bocsátani. Ismételt felhasználás esetén ügyeljen arra, hogy a hőmérséklet állandó maradjon, és jegyezze fel a tisztítási ciklusokat. A sérült vagy láthatóan szennyezett maszkokat semmisítse meg.

Figyelem:

- A felhasználás célja szerint meg kell különböztetni a magunk és mások védelmét szolgáló termékeket.
- A maszk viselése nem helyettesíti a kézmosást/fertőtlenítést, a köhögési etikett vagy a szociális távolságtartás betartását.
- SARS-CoV-2 fertőzés esetén ne maszkot használjon az izoláció helyett. Fertőzésre utaló tünetek esetén maradjon otthon.

Figyelem:

NE érintse meg az arcát!



Az átnedvesedett maszkot semmisítse meg, **NE** használja újra!



A maszkhoz **NE** nyúljon, csak a gumit/kötőt érintse meg!



NE tisztítsa mikrohullámú sütőben!



A maszkot **NE** mossa át/öblítse le/fújja be fertőtlenítőszerrel!



Forrás:

1. www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html (zuletzt aufgerufen am 28.04.2020)
2. www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/19_20_MNB.pdf?__blob=publicationFile (zuletzt aufgerufen am 28.04.2020)
3. www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf (zuletzt aufgerufen am 28.04.2020)